



esterilizar

ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL MÉDICO A BAJA TEMPERATURA

CAPACITACIÓN

No. 21



CAPACITACIÓN No. 21

Jueves 22 de Agosto de 2013

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
(2:30p.m. - 2:40p.m.) - 10 Min.

LIDERAZGO EN LAS LABORES DIARIAS EN UNA C.E.
-Yolanda Eugenia Guzmán-

Instrumentadora Quirúrgica de la Universidad Santiago de Cali. / Técnica en enfermería del SENA. / Especialista en Gerencia de Instituciones Educativas de La Institución Universitaria Antonio José Camacho. / Auditora externa de la Universidad del Valle. / Diplomado en Gerencia en Centrales de Esterilización con el apoyo de la ONG Americana, USAID. / Gerente de Instrumentamos CTA. / Docente de práctica de la Universidad Libre programa de enfermería de VII semestre en Santiago de Cali. / Coordinadora del grupo docente de instrumentamos en Educación Continua de la USC. / Instrumentadora Quirúrgica de Operación Sonrisa Internacional (Labor social en zonas deprimidas económicamente del Cauca, Valle y Nariño). / Docente Tiempo Completo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho con formación de normas por competencia.

(2:45p.m. - 3:30p.m.) - 45 Min.

ACTUALIDAD Y MONITOREO EN LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
(3:35p.m. - 5:05p.m.) - 1 Hora 30 Minutos.

REFRIGERIO
(5:10p.m. - 5:30p.m.) - 20 Min.

RIFA-BECA PARA DIPLOMADO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN
-Institución Universitaria Antonio José Camacho- (Intensidad 144 Horas)
(5:35p.m. - 5:45p.m.) - 10 Min.

ENTREGA DE CERTIFICADOS
(5:50p.m. - 6:00p.m.) - 10 Min.

Capacitación dirigida al Área de Administración, Jefes de Cirugía, Instrumentadores, Jefes de C.E., Auxiliares de C.E. y a todas las personas que interactúan en una C.E. sin importar su cargo.

Fecha:
Jueves
22 de Agosto de 2013

Hora:
2:30p.m. a 6:00p.m.

Lugar:
Casa Roma
Calle 5B No. 41-54
Barrio Tequendama

-Indispensable-
Confirmar asistencia
Vía telefónica

-Publicar-
Este afiche invitación
en su cartelera

info@esterilizar.co

Calle 5B No. 41-32
Teléfono: (2) 683 7766
Celulares: 317 300 0623 - 318 300 0623
Cali-Colombia

Desarrollando **NUESTRA** Página Web

En la constante búsqueda para mejorar nuestros procesos, con gusto informamos la construcción de nuestra Página Web.

En ella tendremos información de interés, servicios y consultas que harán de esta página una herramienta útil para todos nuestros clientes próximamente.

www.esterilizar.co

<http://www.esterilizar.co>

Comunicación oportuna con nuestros clientes

Como **valor agregado**, ahora en nuestra Página Web, tendremos nuestras **Certificaciones** y los **Boletines de Recomendaciones y de Evidencia Fotográfica** de forma virtual, así podrán ser consultadas al instante y cada vez que sea necesario.



BOLETÍN DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN FACTURADO

ESTERILIZAR
ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL MÉDICO A BAJA TEMPERATURA
NIT: 805.018.151-3

ENTIDAD: _____ NIT: _____

CÓDIGO: 000001-PVE FECHA ACTUALIZACIÓN: 25/02/2013

UN MATERIAL SIN EMPACAR: AUMENTO DE 60% A 70% EN VOLUMEN

MATERIAL EMPACADO

CARGA

CARGA	REFERENCIA
1/8	12,5
1/4	25
1/4 + 1/8	37,5
1/2	50
1/2 + 1/8	62,5
3/4	75
3/4 + 1/8	87,5
1	100

INCREMENTO EN VOLUMEN SIN EN: 1/2 + 1/8 DE CARGA = 62,5 X

OBSERVACIONES

Calle 5B No. 41-32 Telefax: (2) 553 4514 Tel: (2) 683 7766 Cali 317

BOLETÍN DE RECOMENDACIONES

ESTERILIZAR
ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL MÉDICO A BAJA TEMPERATURA
NIT: 805.018.151-3

ENTIDAD: _____ NIT: _____

CÓDIGO: 000001-PVE FECHA ACTUALIZACIÓN: 25/02/2013

ESTAMOS REPORTANDO LAS SIGUIENTES NOVEDADES EN EL MATERIAL RECIBIDO:

<input type="checkbox"/> Lavado	<input type="checkbox"/> Humedad	<input type="checkbox"/> Material Dedicado recibido sin Empaque de Protección asignado
<input type="checkbox"/> Empaque	<input type="checkbox"/> Especificación de Empaque	<input type="checkbox"/> El inventario físico no coincide con lo Registrado en la Remisión
<input type="checkbox"/> Equipo Incompleto	<input type="checkbox"/> Remisión Incompleta	<input type="checkbox"/> El Rango de Hora de Entrega del Material
OBSERVACIONES		Otros

Firma Autorizada

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Calle 5B No. 41-32 Telefax: (2) 553 4514 Tel: (2) 683 7766 Cel: 317 300 06 23 318 300 06 23 info@esterilizar.co Cali-Colombia

CERTIFICACIÓN

ESTERILIZAR
ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL MÉDICO A BAJA TEMPERATURA
NIT: 805.018.151-3

Resultados Químico, Físico, Biológico y Registro de los Parámetros del Ciclo de Esterilización con Óxido de Etileno

CÓDIGO: 000016-PVE FECHA ACTUALIZACIÓN: 25/02/2013 FECHA DEL PROCESO: DD / MM / A.A.

ENTIDAD: _____ NIT: _____

INDICADORES QUÍMICOS	INDICADOR BIOLÓGICO
Ind. Q. del Empaque Clase 1 Mide concentración del Gas DE ¿Cambian los indicadores a su respectivo color?	Ind. Q. de Exposición (Cinta Verde / 3M) Clase 1 Mide concentración del Gas DE ¿Cambian las franjas de amarillo a morado?
Ind. Q. Multivariable (MVI) Clase 3 Mide concentración del Gas y temperatura superior a los 50°C ¿Cambió el recuadro naranja (verde a rojo)?	De lectura rápida en 4 Horas Clase 5 Garantiza que el material quedó estéril Resultado de la lectura final después de esterilizar a 134°C por 4 horas el bacillo endosporico

ESTÉRIL NO ESTÉRIL

NO ESTÉRIL NEGATIVO NO ESTÉRIL POSITIVO

TIEMPO DE AIREACIÓN


El tiempo de aireación de los equipos de esterilización que se registran en la cinta verde de cada lote debe ser de 12 horas, desde que el material esté en estado de reposo, hasta que se coloca a lavar en el equipo de lavado. El tiempo de aireación no garantiza la esterilidad del material, pero garantiza la eliminación de los residuos de gas. Para garantizar la eliminación de los residuos de gas, con el cual se miden los resultados de DE en el material esterilizado. Estos resultados están a disposición para ser entregados.

Firma Autorizada

318 300 06 23 info@esterilizar.co Cali-Colombia

Comunicación oportuna con nuestros clientes

 esterilizar ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL MÉDICO A BAJA TEMPERATURA NIT: 805.018.151-3		CERTIFICACIÓN Resultados Químico, Físico, Biológico y Registro de los Parámetros del Ciclo de Esterilización con Oxido de Etileno	
		CÓDIGO FO5016-PVE	FECHA ACTUALIZACIÓN 25 / 02 / 2013
ENTIDAD			NIT
INDICADORES QUÍMICOS	 		INDICADOR BIOLÓGICO
Ind. Q. del Empaque Clase 1 Mide concentración del Gas OE	Ind. Q. de Exposición (Cinta Verde / 3M) Clase 1 Mide concentración del Gas OE	Ind. Q. Multivariable (MVI) Clase 3 Mide concentración del Gas y temperatura superior a los 50°C	De lectura rápida en 4 Horas Clase 5 Garantiza que el material quedó estéril
¿Cambiaron los indicadores a su respectivo color?	¿Cambiaron las franjas de amarillo a marrón?	¿Cambió el recuadro naranja del extremo a rojo?	Resultado de la lectura final después de esterilizar e incubar por 4 horas el bacillus arthropheus

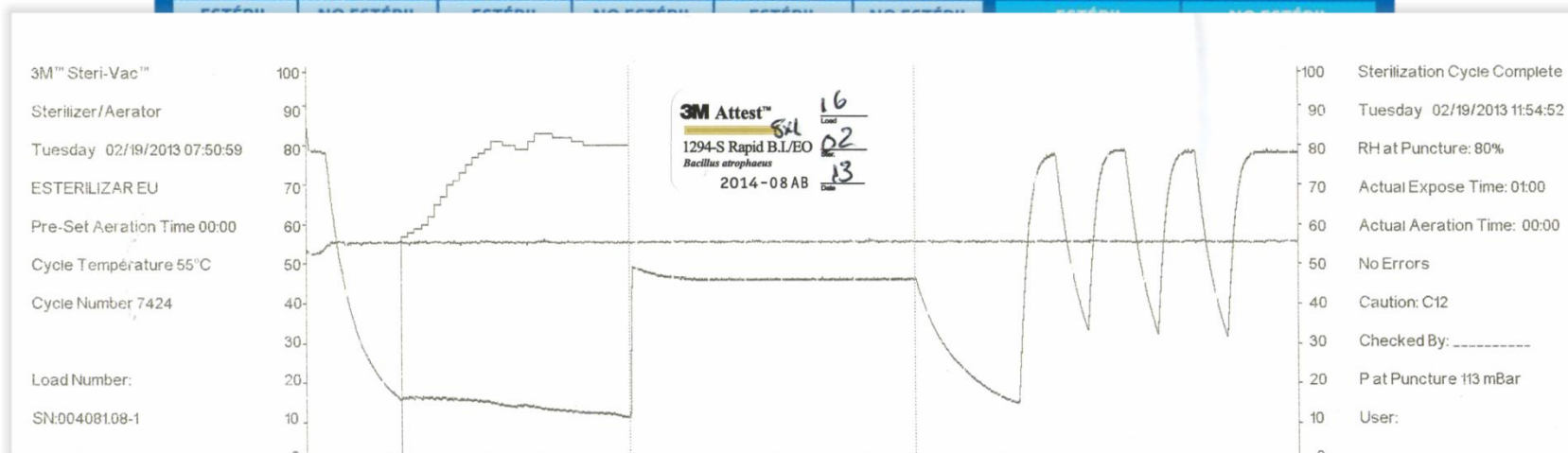

 <p>esterilizar ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL MÉDICO A BAJA TEMPERATURA NIT: 805.018.151-3</p>		<h2>BOLETÍN DE RECOMENDACIONES</h2>	
		CÓDIGO OD5001-PVE	FECHA ACTUALIZACIÓN 25 / 02 / 2013
ENTIDAD Clínica Futuro	NIT 800.258.369-1	FECHA 21/07/2013	
ESTAMOS REPORTANDO LAS SIGUIENTES NOVEDADES EN EL MATERIAL RECIBIDO:			
<input type="checkbox"/> Lavado	<input type="checkbox"/> Humedad	<input type="checkbox"/> Material Delicado recibido sin Empaque de Protección asignado	
<input type="checkbox"/> Empaque	<input type="checkbox"/> Especificación de Empaque	<input type="checkbox"/> El inventario Físico no coincide con lo Registrado en la Remisión	
<input type="checkbox"/> Equipo Incompleto	<input type="checkbox"/> Remisión Incompleta	<input type="checkbox"/> El Rango de Hora de Entrega del Material	
OBSERVACIONES <u>En el momento de hacer el inventario la cámara se encontró quemada</u>		<input checked="" type="checkbox"/> Otros Equipo dañado	
		 Firma Autorizada	
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
			

 esterilizar ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL MÉDICO A BAJA TEMPERATURA NIT: 805.018.151-3		BOLETÍN DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN FACTURADO	
ENTIDAD		NIT	FECHA DD / MM / AA
UN MATERIAL SIN EMPACAR AUMENTA DE 60% A 70% EN VOLUMEN		CÓDIGO FO5009-PVE	FECHA ACTUALIZACIÓN 19 / 03 / 2013
MATERIAL SIN EMPACAR		MATERIAL EMPACADO	
			
CARGA	REFERENCIA	CARGA	REFERENCIA
1/8	12,5	1/8	12,5
1/4	25	1/4	25
1/4 + 1/8	37,5	1/4 + 1/8	37,5
1/2	50	1/2	50
1/2 + 1/8	62,5	1/2 + 1/8	62,5
3/4	75	3/4	75
3/4 + 1/8	87,5	3/4 + 1/8	87,5
1	100	1	100
		11/8	112,5
INCREMENTO EN VOLUMEN SIN EMPACAR A EMPACADO			
1/2 + 1/8 DE CARGA = 62,5	X	60%	1 CARGA = 100
OBSERVACIONES			
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>			
Calle 5B No. 41-32 Telefax: (2) 553 4514 Tel.: (2) 683 7766 Cel.: 317 300 06 23 - 318 300 06 23 info@esterilizar.co Cali-Colombia			

Comunicación oportuna con nuestros clientes

También podrán consultar todo lo referente a las capacitaciones que **Esterilizar** ha realizado.

- 👍 Fechas de Capacitaciones y sus Temas.
- 👍 Memorias de los Expositores.
- 👍 Fotografías de Asistencia.







esterilizar
ESTERILIZACION DE MATERIALES MEDICOS Y BIODIAGNOSTICOS
NIT: 805.018.151-3

PROCESO PROGRAMACIÓN Y TRANSPORTE REMISIÓN Y CUENTA DE COBRO	Código FO5006-PVPT Fecha Emisión 09/10/2012			
DIRECCIÓN: _____	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">DÍA</td> <td style="padding: 2px;">MES</td> <td style="padding: 2px;">AÑO</td> </tr> </table>	DÍA	MES	AÑO
DÍA	MES	AÑO		

ENTIDAD: _____

Cant.	Descripción	Recibe Inventariado No.	Recibe Inventariado No.
1		2	3
2		3	4
3		4	5
4		5	6
5		6	7
6		7	8
7		8	9
8		9	10
9		10	11
10		11	12
11		12	13
12		13	14
13		14	15
14		15	16
15		16	17
16		17	18
17		18	19
18		19	20
19		20	21
20		21	22
21		22	23
22		23	24
23		24	25
24		25	26
25		26	27
26		27	28
27		28	29
28		29	30
29		30	31
30		31	32
31		32	33
32		33	34
33		34	35
34		35	36
35		36	37
36		37	38
37		38	39
38		39	40
39		40	41
40		41	42
41		42	43
42		43	44
43		44	45
44		45	46
45		46	47
46		47	48
47		48	49
48		49	50
49		50	51
50		51	52
51		52	53
52		53	54
53		54	55
54		55	56
55		56	57
56		57	58
57		58	59
58		59	60
59		60	61
60		61	62
61		62	63
62		63	64
63		64	65
64		65	66
65		66	67
66		67	68
67		68	69
68		69	70
69		70	71
70		71	72
71		72	73
72		73	74
73		74	75
74		75	76
75		76	77
76		77	78
77		78	79
78		79	80
79		80	81
80		81	82
81		82	83
82		83	84
83		84	85
84		85	86
85		86	87
86		87	88
87		88	89
88		89	90
89		90	91
90		91	92
91		92	93
92		93	94
93		94	95
94		95	96
95		96	97
96		97	98
97		98	99
98		99	100

ESTERILIZAR E.U. NO SE HACE RESPONSABLE POR EL MATERIAL MANIPULADO (FALTANTES, DETERIORADO Y/O DAÑADO) SI NO HA SIDO INVENTARIADO EN PRESENCIA DE NUESTRO TRANSPORTADOR.

1. Cliente entrega Material NO Estéril Hora de Entrega de: [] [] [] a [] [] [] Firma Auxiliar de CE: _____ Inventariado: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Items: [] Hora: [] [] []	2. Esterilizar E.U. recibe Material NO Estéril Firma Transportador Esterilizar: _____ Inventariado: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Items: [] Hora: [] [] []
3. Esterilizar E.U. recibe Material NO Estéril Firma Auxiliar de CE: _____ Inventariado: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Items: [] Hora: [] [] []	4. Esterilizar E.U. recibe Material Estéril Firma Transportador Esterilizar: _____ Inventariado: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Items: [] Hora: [] [] []

OBSERVACIONES	Uso Exclusivo Esterilizar



Calle 5B No. 41-32 Telefax: (2) 553 4514 Tel.: (2) 683 7766 Cel.: 317 300 0623 - 318 300 0623 info@esterilizar.co Cali-Colombia

Implementando **NUEVAS** formas de Empaque


Algunos dispositivos médicos como son las pinzas de laparoscopia, cánulas largas, etc, requieren ser transportadas en un empaque especial para evitar deterioros y daños en las mismas. Para cubrir esta necesidad **Esterilizar** ha implementado asignarle a la entidad que lo requiera, las nuevas cajas largas de cartón corrugado con tapa, debidamente marcadas.



⑥ Mejoras y Cambios en los últimos 4 meses

- ① Ampliación del área de los **equipos de esterilización**.
Se acondiciono el área para que quedara más grande y espaciosa para manipular mejor las canastillas.
Se adquirió un carrito en acero inoxidable para cargar los equipos, pensando en nuestro recurso humano

DESPUÉS

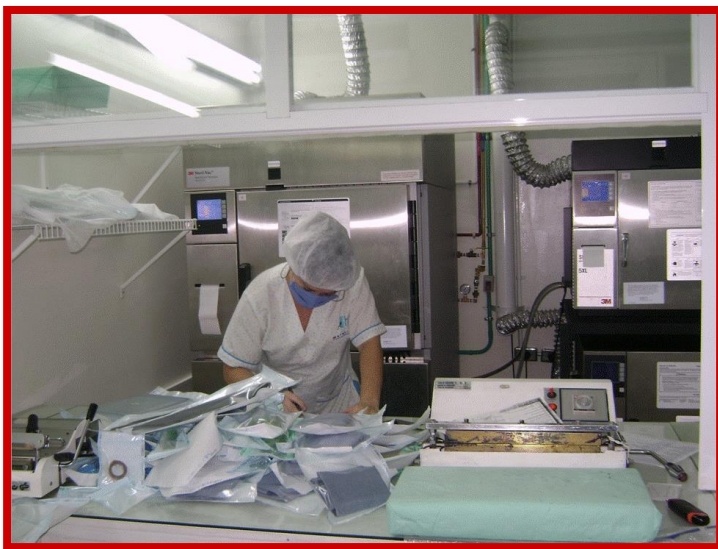

ANTES



⑥ Mejoras y Cambios en los últimos 4 meses

② Adquisición de **puerta corrediza y repisa** hacia el área de esterilización.

DESPUÉS



ANTES



⑥ Mejoras y Cambios en los últimos 4 meses

③ Demolición de mesones y adquisición de un **mesón más grande, alto, cómodo y con los bordes altos** para más seguridad y cajoneros.

DESPUÉS



ANTES



- 4** Cambio del **portarrollos** por uno en acero inoxidable con más capacidad de almacenamiento de **rollos** y más versatilidad.



ANTES

DESPUÉS



6 Mejoras y Cambios en los últimos 4 meses

5 Mejora en la **iluminación**.

Se cambiaron las lámparas por unas **led** que dan más iluminación, más económicas y fácil de limpiar.

DESPUÉS

ANTES



6 Mejoras y Cambios en los últimos 4 meses

- 6 Se ideó una manera segura de entregar el material que no es recibido inventariado por nuestros clientes.
Una **Cámara de Seguridad**.



ANTES

DESPUÉS



Esterilizar esta siempre en busca de la **Mejora Continua**.

**Gracias por escogernos
como su proveedor de confianza**





esterilizar

ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL MÉDICO A BAJA TEMPERATURA

¡BIENVENIDOS!